



Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор)

- Удобная форма и гибкий материал полумаски обеспечивает плотное прилегание к лицу.
- Эластичные ленты обеспечивают комфорт и надёжную фиксацию полумаски.
- Полумаска имеет универсальный размер и подходит к любому типу лица.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1.1. Эксплуатационные ограничения




- респираторы не подлежат использованию при наличии механических повреждений (порезы, просечки, засечки, пробоины);
- не допускается использовать изделие вторично;
- беречь от соприкосновения с острыми и режущими предметами;
- в целях предотвращения возгорания респираторов при эксплуатации следует соблюдать правила пожарной безопасности;
- не хранить изделия вблизи отопительных приборов, вблизи взрывоопасных и горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей.

1.2. Подготовка изделия к использованию

- обработать руки спиртосодержащим антисептиком либо вымыть с мылом;
- извлечь респиратор из упаковки;
- визуально проверить целостность респиратора.

1.3. Использование изделия

- Нижнюю ленту оголовья надеть через голову и разместить на шее. Приложить респиратор к лицу, чтобы нижний срез был под подбородком, а верхний выступ на переносице.
- Верхнюю ленту оголовья поместить на затылок.
- При необходимости отрегулировать натяжение лент оголовья.
- Обеими руками подогнуть носовой зажим, чтобы он плотно прилегал к переносице.
- Уплотнитель должен плотно прилегать к лицу, но не сдавливать кожу.

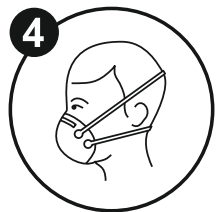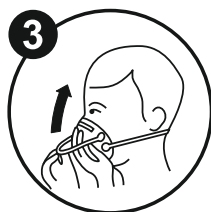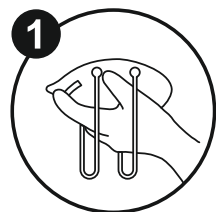

Полумаска-респиратор фильтрующий имеет 3 размера: S, M, L. Идентификация размера указана последней буквой в артикуле.

Чтобы проверить плотность прилегания респиратора к лицу:

А) Для респиратора **без клапана** выдоха: **NF811 FFP1 NR D, NF812 FFP2 NR D, NF813 FFP3 NR D, NF821 FFP1 NR D, NF822 FFP2 NR D, NF823 FFP3 NR D**

- полностью накрыть лицевую часть респиратора руками, не сдвигая её;
- сделать резкий **ВЫДОХ**.
- если воздух проходит в области носа, подожмите носовой зажим для устранения просачивания. Повторите проверку, как указано выше.
- если воздух проходит через полосу прилегания респиратора к лицу, отрегулируйте натяжение лент оголовья. Повторите проверку, как указано выше.

Б) Для респиратора **с клапаном** выдоха: **NF811V FFP1 NR D, NF812V FFP2 NR D, NF813V FFP3 NR D, NF821V FFP1 NR D, NF822V FFP2 NR D, NF823V FFP3 NR D**

- полностью накрыть лицевую часть респиратора руками, не сдвигая её;
- сделать резкий **ВДОХ**.
- если воздух проходит в области носа, подожмите носовой зажим для устранения просачивания. Повторите проверку, как указано выше.
- если воздух проходит через полосу прилегания респиратора к лицу, отрегулируйте натяжение лент оголовья. Повторите проверку, как указано выше.

Если **НЕВОЗМОЖНО** достичь правильного прилегания, **НЕ ВХОДИТЕ В РАБОЧУЮ ЗОНУ!**

При затруднении дыхания или повреждении – респиратор необходимо заменить новым.

Снимать в чистой зоне плавно, не касаясь внутренней поверхности.

После использования утилизировать.

Внимание! Эксплуатация полумаски разрешается до затруднения дыхания.

Предупреждения и ограничения по использованию:

- Всегда убеждайтесь, что изделие: подходит для соответствующего вида работ, используйте при отсутствии медицинских противопоказаний, правильно надето.
- Применение допускается при объёмной доле кислорода не менее 17%.
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не должно превышать 1 об. %.
- Не используйте изделие: при недостаточно плотном прилегании к лицу (наличие усов, бороды, бакенбардов), при выполнении работ, связанных с открытым огнём, для защиты от паров и газов, при затруднённом дыхании.
- Перед началом использования всегда проверяйте, что срок годности изделия ещё не истёк (дата окончания срока годности указана на изделии).

Материал изделия: полипропилен.

Срок эксплуатации: полумаска предназначена для одноразового использования в течение 1 рабочей смены.

Хранение и транспортировка: хранить в чистом виде в сухом, проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Транспортировать в упаковке производителя, не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Изделие сертифицировано.

Сертификат соответствия EAC RU №0319674

Данное изделие изготовлено в соответствии с ТУ 14.12.30-002-22539449-2020.

Дата изготовления указана на упаковке. Срок хранения 5 лет.

Изготовлено: ООО «Невский фильтр» завод №1, 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д.23, лит. А
Контактные телефоны: +7 (812) 401-68-11, 8 (800) 707-86-11 (звонок по России бесплатный).

www.nf-medics.ru, e-mail: nf-medics@mail.ru